



Istruzioni di Utilizzo


- 1** Lavare e asciugare le mani. Quindi estrarre la carta di prova dalla confezione esterna.

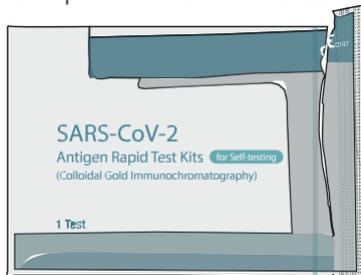

- 2** Posizionare la test card in piano sul tavolo, rimuovere lo strato di copertura dell'adesivo.

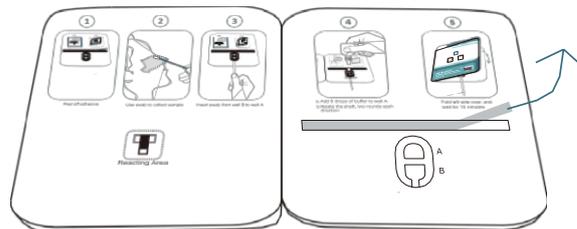


- 3** Estrarre il tampone dall'estremità del bastoncino, fare riferimento alla raccolta di campioni di riferimento

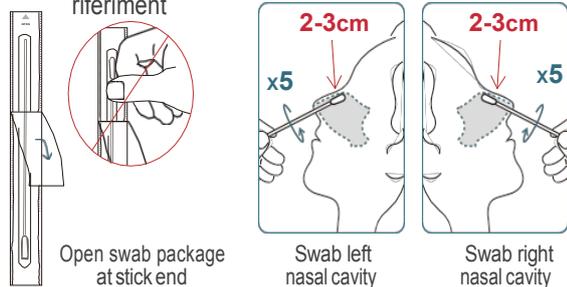


Nota: non toccare la testina del tampone. **Nota:** è richiesto il campionamento in entrambe le cavità nasali.

La testina del tampone nasale deve essere inserita completamente nella cavità nasale fino a quando non si avverte resistenza (circa 2-3 cm) e ruotata delicatamente 5 volte. Quando è stato rimosso, il campione deve essere prelevato allo stesso modo in un'altra cavità nasale per garantire la raccolta di campioni sufficienti. La lunghezza della cavità nasale anteriore degli utenti può essere diversa nelle diverse regioni, 2-3 cm è solo per riferimento. Si consiglia

- 4** Inserire la testina del tampone nel pozzetto A dal fondo del pozzetto B.

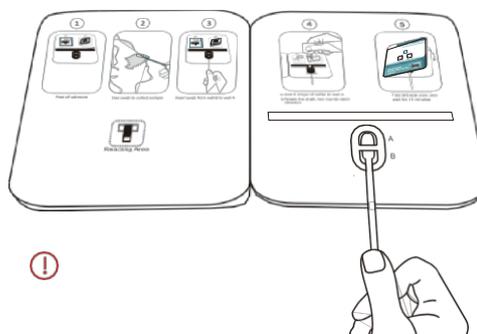


- 5** Aggiungere 6 gocce della soluzione per il trattamento del campione nel pozzetto A. Quindi ruotare il tampone per 2 giri, in ciascuna direzione

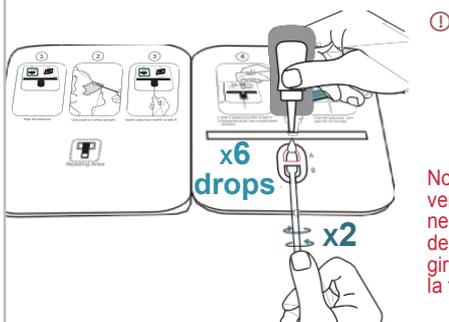

Nota: possono verificarsi risultati falsi negativi se il tampone del campione non viene girato prima di chiudere la test card.

- 6** Pieghere il lato sinistro, unire completamente due lati, iniziare a cronometrare.

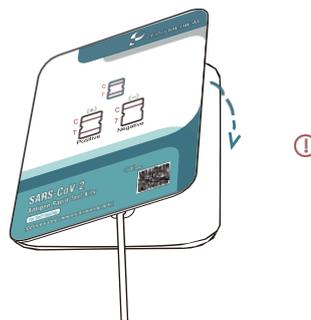


- 7** Attendi la comparsa della linea rosso porpora. I risultati del test devono essere letti entro 15-20 minuti



15-20 min

- 8** Dopo il test, inserire la scheda di prova, il tampone e il flacone della soluzione di trattamento del campione nella confezione esterna e sigillarlo ermeticamente. Smaltire il sacco nel contenitore dei rifiuti secondo le leggi e le normative locali.

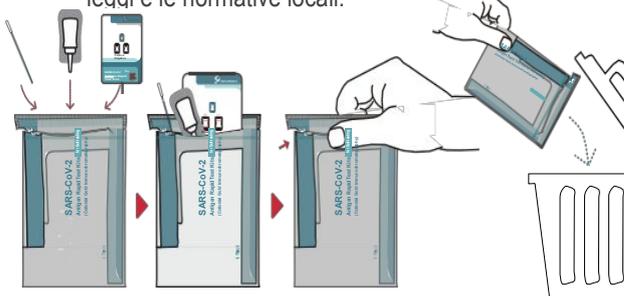


Interpretazione dei risultati

· Positivo (+): appare una banda rosso porpora nella linea di controllo (C) e nella linea di test (T).



· Negativo (-): solo la linea di controllo (C) mostra una banda rosso porpora. Non appare alcuna banda rosso porpora nella linea di prova (T).

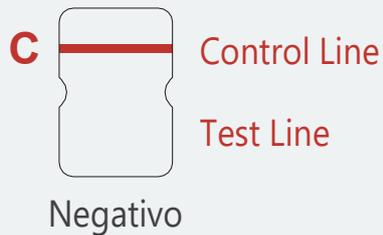

· Non valido: se "non appare alcuna banda rosso porpora nella linea di controllo (C)" e "appare una banda blu nella linea di controllo (C)", indica che il processo operativo non è corretto o che la carta di prova è stata danneggiata. In questo caso, leggere di nuovo attentamente il manuale di istruzioni e riprovare con una nuova carta reattiva. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo di questo lotto di prodotti e contatta il tuo fornitore locale.

